

# 품 질 보 증 서

|       |             |              |
|-------|-------------|--------------|
| 품 목 명 | 일반침대용 사이드레일 | 보증기간         |
| 제 품 명 | MBS-200     | 구입일로부터<br>1년 |
| 구 입 일 | 년 월 일       |              |

|     |        |     |  |
|-----|--------|-----|--|
| 고 객 | 주소     | 성 명 |  |
|     |        | 연락처 |  |
| 판매점 | 주소(상호) | 담당자 |  |
|     |        | 연락처 |  |

1. 제품 구입시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.
2. 본 제품은 출고시 엄밀한 품질관리를 거쳐 생산된 제품입니다.
3. 운송 도중 발생한 파손이나 도금형태가 변질되어 사용불능일 경우, 보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드립니다.
4. 본 보증서는 재발행되지 않으며, 국내에서만 유효합니다.
5. A/S 및 문의처 : 1577-5195 / 055-323-5195

# 보 증 규 정

고객께서 구입하신 본 제품에 대하여 아래와 같은 조건으로 보증하여 드립니다.

1. 보증기간  
제품의 정상적인 상태에서 발생한 고장에 대하여 1년간 보증하여 드립니다.
2. 보증수리 제외사항
  - 1) 사용자의 취급부주의 및 조작의 잘못으로 인한 고장이나 파손
  - 2) 당사 지정 수리요원 외 제3자가 수리하였거나 부당한 수리 개조에 의한 고장이나 파손
  - 3) 보증서를 분실 또는 수탁 판매점의 직인이 없을 때
  - 4) 천재지변에 의한 고장 및 파손
3. 보증기간 외의 수리  
보증기간 경과 후의 수리 요청 시에는 소정의 기술료를 징수합니다.
4. 기타  
본 보증규정 이외의 사항에 대하여는 "소비자 기본법"에 의거한 "소비자 분쟁해결기준"에 의해 처리됩니다.

# 사 용 설 명 서

## 일반침대용 사이드레일 MBS-200



**MC Tec**

제품문의 : (주)엠씨텍 1577-5195  
 경남 김해시 주촌면 골든루트로66번길 48-1  
[www.mctec.co.kr](http://www.mctec.co.kr)

- 본 제품은 거동이 불편한 노인, 장애인, 환자가 낙상을 방지하기 위해 침대에 고정하여 사용하는 사이드레일입니다.
- 본 제품은 침대프레임과 매트리스 사이에 사이드레일의 베이스를 간편하게 거치하고 사용하는 제품입니다.

## 제품의 사양

- 제품명 : 일반침대용 사이드레일 MBS-200
- 규격 : 860(L)mm x 535(W)mm x 750~850(H)mm
- 무게 : 3.5kg
- 재질 : 스테인레스 스틸(SUS), 고무, 아연다이캐스팅



현대적인 사이드레일 디자인은 어떤 침실에도 잘 어울리고 다양한 침대에 맞게 제작되어 손쉽게 조절할 수도 있으며, 노인, 장애인, 환자 등 지원이 필요한 사람들에게 안전과 편안함을 제공합니다

## 제품의 특징

- 침대 오른쪽, 왼쪽을 선택적으로 사용할 수 있습니다.
- 누구나 쉽고 간편하게 조립할 수 있습니다.
- 미끄럼방지 품으로 처리하여 부드럽고 편안함을 주는 손잡이입니다.
- 침대프레임 위에 베이스튜브를 설치하고 매트리스의 하중으로 고정합니다.
- 높이 조절이 가능하고 바닥에 착지되어 안정감 있는 지지형 다리의 사이드레일입니다.

## 제품의 사용방법

- 사용설명서를 보고 구성품을 조립한 다음 견고하게 연결되었는지 확인 후 사용하십시오.
- 침대의 왼편, 오른편 중 본 제품을 설치할 곳을 정합니다.
- 침대프레임위에 본 제품의 수평(베이스튜브)부분을 설치하고 매트리스를 올리면 그 하중으로 고정이 됩니다.
- 전면부의 지지형 다리는 높이(21~31cm)를 조절하여 바닥에 고정합니다.
- 상부의 손잡이에 장착된 커버포켓에 간단한 물품을 수납할 수 있습니다.

## 제품의 주의사항

- 본 제품을 사용할 때는 설명서를 잘 읽고 사용하시기 바랍니다.
- 본 제품은 기립 보조제품이므로 이를 밀거나 당긴다든지 하는 무리한 동작을 삼가하시고 주로 앉거나 일어설 때 수직으로 짚으면서 사용합니다.
- 경우에 따라 안전벨트(별매품)를 침대 프레임의 반대편에 연결시켜 사용할 수도 있습니다.
- 사용 중 문의점이 있으면 A/S센터로 연락바랍니다.(1577-5195)

## 단체표준인증 및 우수제품인증

|  |                                                                                                                                                                  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 단체표준명(품명): 고령자용 침대 사이드레일<br>단체표준번호: KSPA 1017<br>인증번호: 제868호(20220310-2)<br>모델명 및 모델 고유번호: MBS-200<br>제조년월:<br>제조자명: (주)엠씨텍<br>A/S 전화번호: 1577-5195<br>제조국명: 대한민국 |
|  | 품 질 보 증<br>본 제품은 단체표준인증단체인 당 협회에서 단체표준제품임을 보증함<br>한국고령친화용품산업협회                                                                                                   |

※ 본 제품을 사용하기 전에 이 설명서를 반드시 읽어보신 후, 사용하고 이후에도 설명서를 잘 보관해 두시기 바랍니다.