

사 용 설 명 서

MSH-105




※ 본 제품을 사용하기 전에 이 설명서를 반드시 읽어 보신 후 사용하시고
이후에도 설명서를 잘 보관해 두시기 바랍니다.

※ 본 제품은 환자나 고령자의 편의를 위하여 사용하는 안전손잡이입니다.

1. 제품 사양

제품명	MSH-105
제품규격	500(L)mm * 600(W)mm * 615(H)mm
제품무게	약 8.5kg
안전동작하중	약 80kg
제품재질	프레임(철), 프레임 조인트(알루미늄) 스펀지 호스(스펀지), 기타 사출(P.P)

2. 제품 구성

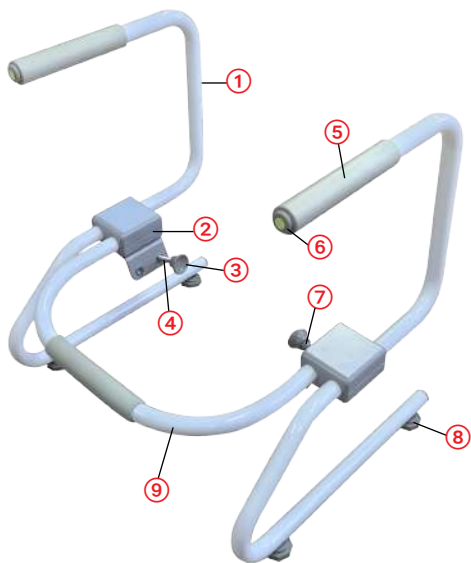

부품명	⑥ 원형 마개
① 다릿대 프레임	⑦ 고정 노브캡
② 프레임 조인트 세트	⑧ 받침대 노브
③ 고정용 사출	⑨ U 프레임
④ 고정 노브	⑩ 보조 벨트
⑤ 스펀지 호스	⑪ 연장 볼트



⑩



⑪

3. 제품 소개

- 1) 본 제품은 거동이 불편한 노약자가 화장실에서 좌변기를 사용할 때 착석과 기립을 지원해주고, 낙상예방에 도움이 되는 안전손잡이이며, 사용자 스스로 안락한 배변활동을 할 수 있도록 도와주는 제품입니다.
- 2) 본 제품은 다양한 형태의 좌변기에 범용적인 장착이 가능하도록 제작되었습니다.
- 3) 본 제품은 간편한 조작으로 설치가 가능하고, 설치 후 바로 사용이 가능합니다.
- 4) 본 제품은 경사에 맞춰 받침대 노브로 수평을 조절할 수 있습니다.
- 5) 본 제품은 단체표준인증(KSPA)을 받은 제품입니다.

4. 제품 사용 전 주의사항

- 1) 제품 설치 전, 설명서에 명시된 제품의 규격을 확인하여 주시고
설치장소의 여유공간을 벽과 문으로부터 약 15cm 가량 확보하여 주십시오.
- 2) 설치전, 볼트 및 연결부분이 단단하게 조립되어 있는지 확인 후 사용하십시오.
- 3) 가급적 평평한 바닥 부분을 찾아서 물기를 제거하고 설치하여 주십시오.
- 4) 본 제품을 좌변기에 밀착한 후 안전손잡이 양측면의
고정 노브를 돌리면 노브의 볼트가 변기에 밀착, 고정시키게 됩니다.
(과도한 고정으로 변기 파손이 되지 않도록 유의합니다.)
- 5) 본 제품이 좌변기에 흔들림 없이 조립되어 있는지 확인 후 사용하십시오.
단단히 조립되지 않은 경우, 파손이나 부상이 발생할 수도 있습니다.
- 6) 과도한 하중이나 충격은 파손의 원인이 되니 주의하십시오,
- 7) 제품에 이상이 있을 경우 제조사에 문의주시기 바랍니다.
(Tel. 1577-5195)


5. 제품 사용 중 주의사항

- 1) 본 제품을 임의로 분해하거나 강한 충격을 가하지 마십시오.
- 2) 번기에 부착 후 매달리거나 좌우로 흔들어서는 안됩니다.
- 3) 기타 다른 물건을 걸어두거나 장착하지 마십시오.
- 4) 안전동작하중 초과자는 사용하지 마십시오.
- 5) 세척 후 충분히 건조하여 사용하십시오.

6. 제품 손질 및 보수 방법

- 1) 가급적 불필요한 물기를 피해주시고 건조한 상태로 사용하시기 바랍니다.
- 2) 사용 중 오염이 된 경우에는 세제 등을 사용하여 세척하시고 마른 수건으로 닦고 충분히 건조하여 주시길 바랍니다.


7. 제품 손질 및 보수 방법

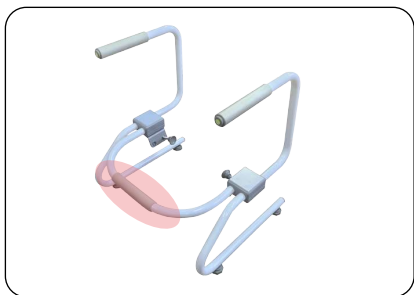

제품 상태를 점검하여
정상작동 유무를 확인합니다.



앞쪽의 스펀지가
변기에 닿을 때까지 밀어줍니다.
밀착되고 양쪽에 공간이
균등한지 확인합니다.

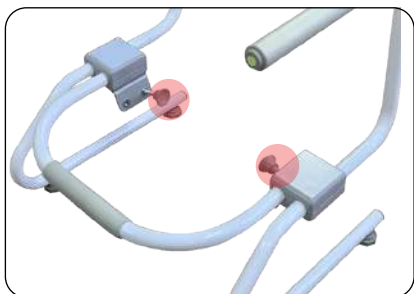

양쪽 고정 사출물이 변기에
밀착되도록 고정 노브를 조절하여
변기에 고정시킵니다.

**※ 과도한 고정으로 변기 파손이
되지 않도록 유의합니다.**



보조벨트로 변기 후면을 감싸면서
양끝을 안전손잡이에 연결시켜
고정을 보강할 수 있습니다.

8. 연장 볼트 사용 사례

* 추가적인 조절이 필요할 경우 아래와 같이 사용 가능합니다.



① 고정 노브에 설치하여 길이 연장



② 받침대 노브에 설치하여 높이 조절



연장볼트 상세(30mm)

※기본 2개 동봉

추가 구매를 원하시면 [1577-5195] 으로 연락주세요.

9. 단체표준인증



단체표준명(품명) : 안전손잡이
 단체표준번호 : KSPA 5001
 인증번호 : 제990호 (20231201-1)
 모델명 및 모델 고유번호 : MSH-105
 제조년월 :
 제조자명 : (주)엠씨텍
 A/S 전화번호 : 1577-5195
 제조국명 : 한국

품 질 보 증

본 제품은 단체표준인증단체인 당 협회에서 단체표준제품임을 보증함
 (사)한국고령친화용품산업협회

품 질 보 증 서

품 목 명	안전손잡이	보증기간
제 품 명	MSH-105	구입일로부터 1년
구 입 일	년 월 일	

보 증 규 정

고객님께서 구입하신 본 제품에 대하여 아래와 같은 조건으로 보증하여 드립니다.

1. 보증기간

제품의 정상적인 상태 하에서 발생한 고장에 대하여 1년간 보증하여 드립니다.

2. 보증수리 제외사항

- 1) 사용자의 취급 부주의 및 조작의 잘못으로 인한 고장이나 파손
- 2) 당사 지정 수리요원 외 제3자가 수리하였거나 부당한 수리 개조에 의한 고장이나 파손
- 3) 보증서를 분실 또는 수탁 판매점의 직인이 없을 때
- 4) 천재지변에 의한 고장 및 파손

3. 보증기간 외의 수리 시

보증기간 경과 후의 수리 요청 시에는 소정의 기술료를 징수합니다.

4. 기타

본 보증 규정 이외의 사항에 대해서는
“소비자 기본법”에 의거한 “소비자 분쟁해결기준”에 의해 처리됩니다.

1. 본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 생산된 제품입니다.
2. 운송 도중 발생한 파손이나 도금 형태가 변질되어 사용불능일 경우,
보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드립니다.
3. 본 보증서는 재발행되지 않으며, 국내에서만 유효합니다.

A/S 및 문의처

MC^{Tec}

(주)엠씨텍
경남 김해시 주촌면 골든루트로66번길 48-1

1577-5195

055-323-5195